

ÖRNEK KABUL/RED KRİTERLERİ LİSTESİ

Doküman No	: LS.10
Yayın Tarihi	: 03.06.2016
Rev. No/Tarih	: 02/23.05.2022
Sayfa No	: 1 / 1

<u>İSTENEN ANALİZ</u>	<u>ÖRNEK TÜRÜ</u>	<u>MİKTAR</u>	<u>MATERYAL</u>	<u>ÖRNEK KABUL</u>	<u>ÖRNEK RED</u>
Moleküler	Kan	2-5 ml	EDTA'lı (mor kapaklı)	<u>Kan alındıktan sonraki 2 gün içerisinde</u>	Dondurulmuş ve pıhtılaşmış örnekler
Moleküler	Kemil İliği	2'lik 2 tüp	EDTA'lı (mor kapaklı)	<u>Kan alındıktan sonraki 2 gün içerisinde</u>	Dondurulmuş ve pıhtılaşmış örnekler
Moleküler	Kan	10 ml (2 adet tüp)	Streck Tüp	<u>Aynı gün içerisinde</u>	Dondurulmuş ve pıhtılaşmış örnekler
Moleküler	Doku	-	Parafin Blok	<u>Patolog tarafından değerlendirilir.</u>	<u>Patolog tarafından değerlendirilir.</u>
Moleküler	Blastomer Trofektoderm	-	PBS içerisinde	<u>2,5 mikrolitre PBS içerisinde olmalıdır.</u>	Dondurulmuş, alkol veya formaldehit içerisinde alınmış örnekler, PBS 2,5 mikrolitreden fazla ise
Sitogenetik (Kromozom analizi)	Kan	2-5 ml	Heparinli (yeşil kapaklı) tüp veya enjektör	<u>Kan alındıktan sonraki 2 gün içerisinde</u>	Dondurulmuş ve pıhtılaşmış örnekler
	Amniyon sıvısı	20 ml	Enjektör	<u>Aynı gün içerisinde ulaştırılmayacak örnekler buz aküsü ile gönderilmelidir.</u>	Kanlı, dondurulmuş, alkol veya formaldehit içerisinde alınmış örnekler
	Korionik villus (CVS)	10-20 mg	Steril kapta transport mediumu içinde	<u>Aynı gün içerisinde ulaştırılmayacak örnekler buz aküsü ile gönderilmelidir.</u>	Dondurulmuş, alkol veya formaldehit içerisinde alınmış örnekler
	Doku	3 mikronluk 3 adet kesit	Pozitif şarjlı lam	<u>Patolog tarafından değerlendirilir.</u>	<u>Patolog tarafından değerlendirilir.</u>
	Blastomer (PGT FISH)	-	Mineral yağ içinde veya lama fikse edilmiş	<u>Mineral yağ içinde veya lama fikse edilmiş</u>	Dondurulmuş, alkol veya formaldehit içerisinde alınmış örnekler
Moleküler Sitogenetik (FISH) Moleküler	Abort materyali	-	Steril kapta transport mediumu içinde	<u>Aynı gün içerisinde ulaştırılmayacak örnekler buz aküsü ile gönderilmelidir.</u>	Dondurulmuş, alkol veya formaldehit içerisinde alınmış örnekler
	Fetal kan	2-5 ml	Heparinli (yeşil kapaklı) tüp veya enjektör	<u>Kan alındıktan sonraki 2 gün içerisinde</u>	Dondurulmuş ve pıhtılaşmış örnekler
	Kemik iliği	1-2 ml	Heparinli (yeşil kapaklı) tüp veya enjektör	<u>Örnek alındıktan sonraki 2 gün içerisinde</u>	Dondurulmuş ve uzun süre beklemiş örnekler
	Sperm (FISH)	5 ml	Yıkanmış semen	<u>Örnek alındıktan sonraki 2 gün içerisinde</u>	Dondurulmuş ve uzun süre beklemiş örnekler

Notlar:

- 1)Transport işlemi sırasında buz vb. malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 2) Korionik villus (CVS) ve Abort materyali için gereken transport besiyeri işleminden 1 gün önce laboratuvarımızdan temin edilebilir.